

**Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:**

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- telinga super lembut Loop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

**Klip hidung**

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

**Tali telinga elastis lembut**

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

**Tahan air**

Tes bukti air, lebih bernapas

**Lipat desain**

Mudah diterima

**Produk Spesifikasi:**

Nama	Masker wajah KF94 sekali pakai
Kain M. Aterial	Layer 1: pp non woven (pencetakan khusus) Layer 2: kertas filtrasi tinggi Layer 3.: kertas filtrasi tinggi Layer 4: pp non woven
Gaya	4ply, dengan putaran telinga loop
Ukuran dimensi	20 * 8 cm
berat kain	30 GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, bisa sebagai permintaan Anda
Warna	Masker berwarna-warni
Sertifikat	ce, ISO13485, FDA.
MOQ.	20000 pcs.
Desain pengepakan	dapat seperti desain Anda
Sedang mengemas	5 0 pcs / box, 2000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan anda
Kemampuan	1 juta pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu

**Gambar KF94**















# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.