

Panoramica di configurazione

Questo [abito](#) è progettato per la protezione opzionale durante le procedure chirurgiche di Durata moderata che coinvolge

Rischio moderato di infezione.

. È costituito da:

Materiale: SMS, PP, PP+PE, CPE

Colore: blu, bianco

2 maniche lunghe con cuffia a maglia o bracciale elastico

Collo posteriore in velcro, cravatta sul collo o collare rotondo e vita

Specifiche tecniche

Raccomanda materia prima: [sms](#), PP+PE, CPE

stile: due maniche lunghe con cuffia a maglia, collo posteriore in velcro o cravatta sul collo e vitaS

Dimensioni: CM

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108 × 138 (S)	108	137	65	58	± 2
115 × 137 (M)	115	138	65	58	± 2
120 × 150 (L)	120	150	65	59	± 2
130 × 150 (XL)	130	150	69	59	± 2
140 × 160 (XXL)	140	160	69	61	± 2

imballaggio

1PC/ Bag, 50PC/cartone

cartone: 50cm*32 cm*30 cm, Circa 540 cartoni in 20 GP, 1080 cartoni in un 40HQ

Istruzioni

1. Lavaggio delle mani pulite;
2. Controllando il pacchetto chirurgico sterile (non scadenza, danneggiato, bagnato e così via ..)
3. Togliere la borsa sterile ed eliminare il [abito](#) e aprilo.
4. Cattura il collare degli abiti, la cravatta sul lato del collo dovrebbe essere faccia a faccia per il corpo, lieve Scuoti gli abiti Per assicurarsi che lo sia t Apertura otalmente;

5. Mettendo le mani in secondo due maniche, fino alle mani totalmente usciti;

6. Tie fisso sul collo e in vita, regolare i legami adattati perfettamente al corpo, conformandosi al corpo contorno del tuo corpo.

Stitched seams




Ultrasonic sealing seams





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

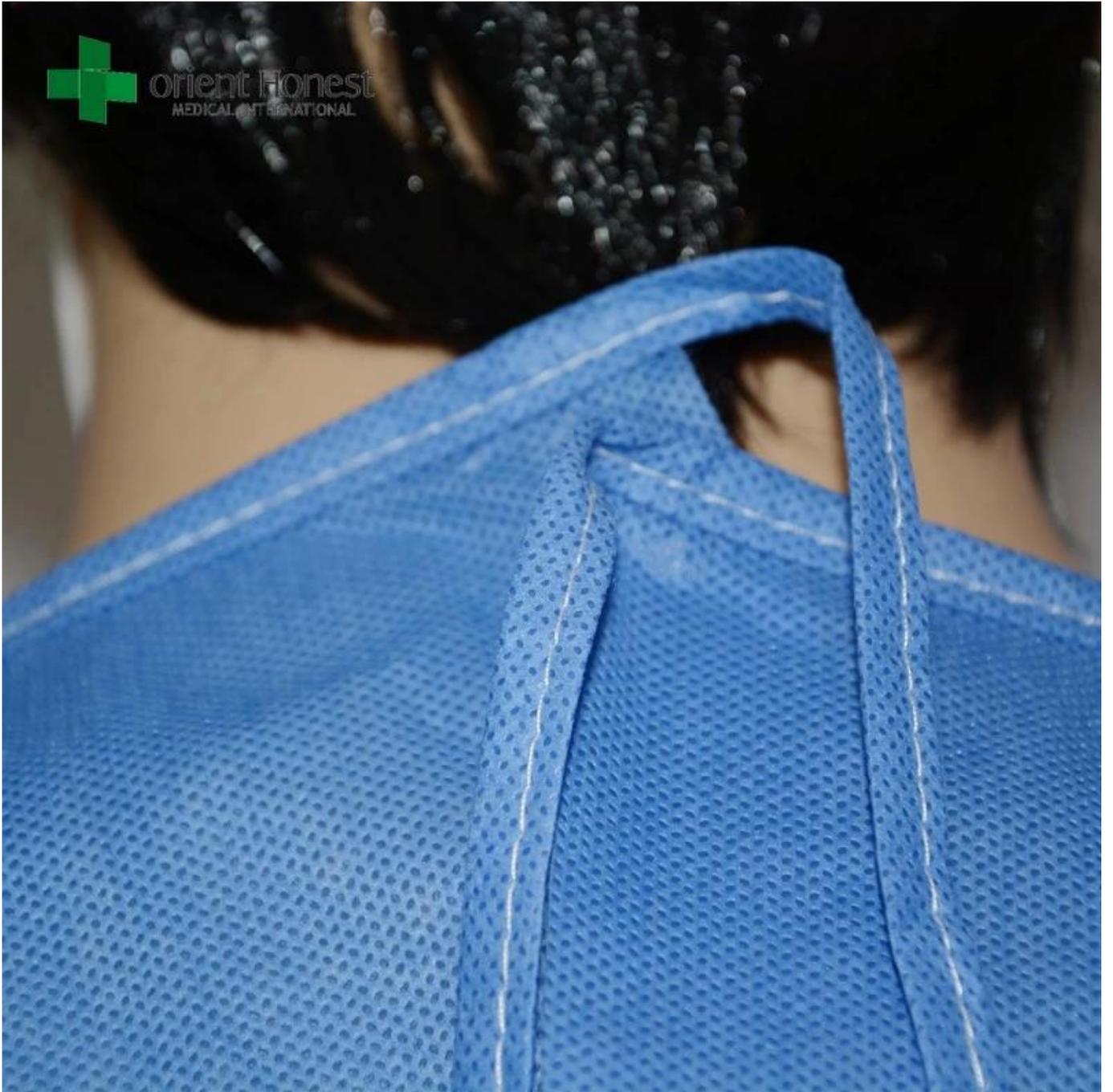



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
Klasifikasi: 100% Polyester





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orientHonest
MEDICAL INTERNATIONAL

