

Especificações do produto:

4Layers. **Máscara KF94**. Com ultréios, adulto 20 \* 8cm,

A primeira camada: tecido não tecido (camada externa)

A segunda camada: derreter pano soprado

A terceira camada: pano derretido

A quarta camada: tecido não tecido (camada interna)

Clipe de nariz

Ponte de nariz ajustável,

Alça de ouvido elástico macio

Alto gancho de orelha elástica que ouve orelhas por um longo tempo.

À prova d'água

Teste à prova de água, mais respirável

Dobre design

Fácil de receber




Descrição do produto

Nome	Máscara de rosto KF94 descartável
Material	Máscara facial não tecida

Cor	Preto, azul, vermelho, verde, amarelo
Lugar de origem	Hubei, China (Mainland)
Especificações	Proteção 1.4-PLY, altamente respirável
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Style: laço ajustável da ponte do nariz em
	Eficiência de filtração 4.High
Tipo de ply.	4 camadas
Estilo	lagoa
Formulários	Hospital, Laboratório, Indústria de alimentos, Workshop livre de poeira, eletrônica fabricantes e assim por diante
Embalagem	20pcs / caixa, 2000pcs / ctn, ou como suas necessidades
Observação	tudo pode ser especial personalizado de acordo com o seu real

## HOW TO USE

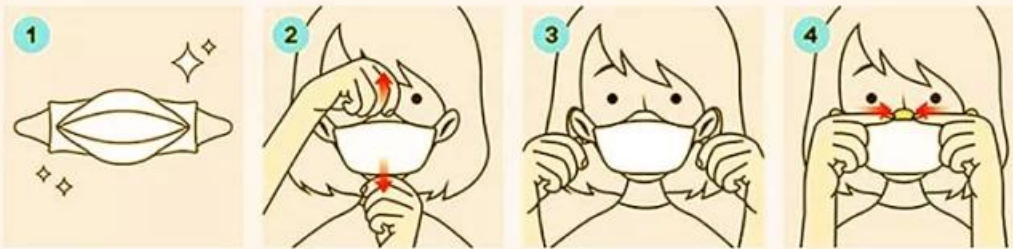

- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

### Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



